

Packungsbeilage \* Informationen für den Anwender

**Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie EarPro Ohrenspray anwenden.**

Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Möglicherweise möchten Sie diese später erneut lesen. Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, beenden Sie die Anwendung und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Bitte informieren Sie uns unter [info@earpro.co](mailto:info@earpro.co)

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist EarPro und wofür wird es angewendet?
2. Zusammensetzung
3. Vorsichtsmaßnahmen: Was müssen Sie vor der Anwendung von EarPro beachten?
4. Hinweise: Wie ist EarPro anzuwenden?
5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
6. Wie ist EarPro aufzubewahren?

## 1. WAS IST EarPro UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

• EarPro-Ohrenspray wird angewendet, um zu **verhindern, dass Wasser im Gehörgang eingeschlossen wird.**

**EarPro ist geeignet für Kinder und Erwachsene jeden Alters.**

Eingeschlossenes Wasser im Ohr ist ein sehr häufiges Problem und kann zu folgenden Beschwerden führen: Unwohlsein, Schmerzen, Entzündungen, Schwimmer-Ohr oder Surfers-Ear.

**EarPro erzeugt eine wasserabweisende Beschichtung im Gehörgang** und wird auf natürlichem Wege abtransportiert. EarPro wird häufig von **Schwimmern, Familien, Tauchern, Surfern und Leistungssportlern** verwendet

## 2. Zusammensetzung

Die **Bestandteile von EarPro** sind: Medizinisches Paraffinöl, Oregano Öl.

## 3. VORSICHTSMAßNAHMEN:

**Was müssen Sie vor der Anwendung von EarPro beachten?**

**Verwenden Sie EarPro nicht:**

• wenn Sie **allergisch (überempfindlich)** gegen medizinisch Paraffinöl oder Oregano Öl Ohrenspray sind

• wenn Sie **perforierte/verletzte Trommelfelle-** oder eine Ohreninfektion haben (z.B. nach **Ohrenoperationen, Paukenröhrchen** etc.)

• wenn Sie anderweitige Probleme mit Ihren Ohren haben - wie **Schmerzen, Schwellungen, Ausfluss**

**Sprühen Sie nicht in Augen, Nase oder Mund Wenn EarPro in die Augen kommt**

• Achten Sie darauf, dass Sie EarPro nicht in die Augen bekommen.

• Wenn dies passiert, spülen Sie das Auge sofort 10 bis 15 Minuten lang mit Wasser. Halten Sie dabei die Augenlider auseinander und vermeiden Sie, dass die Spülflüssigkeit in das andere Auge gelangt.

• Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker,

wenn eine Reizung anhält.

## Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Es liegen keine Erfahrungen oder Untersuchungen von der Verwendung von EarPro bei Schwangeren oder während der Stillzeit vor. Daher sollte das Produkt im Zweifel nicht angewendet werden.

**Jede EarPro Flasche sollte immer nur von ein und derselben Person verwendet werden. Sprühen Sie nicht in der Nähe von offenem Feuer.**

## 4. Hinweise: WIE IST EarPro ANZUWENDEN?

**Verwenden Sie EarPro nur in den Ohren. In der Handfläche erwärmen, gut schütteln und dann 3-4 Mal auf die Pumpe drücken, bis ein Sprühstoß entsteht. Richten Sie die Düse nicht auf sich selbst oder andere Personen**

Geben Sie jeweils 1 Sprühstöße EarPro in jedes Ohr. Massieren Sie den Tragus (Außenhaut hinter dem Ohr) sanft, um sicherzustellen, dass sich EarPro gleichmäßig im Gehörgang verteilt. Wischen Sie eventuelle Reste mit einem Tuch ab. Nach Gebrauch Hände waschen.

**Verschließen Sie Ihre Ohren nicht mit Watte. Wiederholen Sie die Anwendung nach 2 Stunden** Aufenthalt im Wasser.

Geben Sie nach Gebrauch die Flasche in den Karton zurück.

## 5. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, wenn das Produkt gemäß der Gebrauchsanleitung nur äußerlich angewendet wird. Falls das Produkt verschluckt wird können Nebenwirkungen auftreten und ein Arzt sollte aufgesucht werden. **Beenden Sie die Verwendung** dieses Produkts und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## 6. WIE IST EarPro AUFZUBEWAHREN?

- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht nach dem auf der Flasche und dem Umkarton angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
- Verwenden Sie das Produkt nach dem Öffnen nicht länger als 6 Monate.
- Nicht über 30 °C / 86°F. lagern.
- Bewahren Sie die Flasche aufrecht im Umkarton auf, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Fragen oder Kommentare:

[www.earpro.co](http://www.earpro.co)

## Hersteller:

LiquidPro Ltd  
166 Old Bakery Street  
Valletta VLT1455 Malta  
Dieses Merkblatt wurde zuletzt im September 2019 überarbeitet.

EarPro ist eine eingetragene Marke von LiquidPro Ltd.